


VENDLET Standard

SNELSTARTGIDS

HET GEBRUIK

1. Stel het bed op de juiste werkhoogte in.
2. Dubbelklik op  om VENDLET Standard te activeren. Er klinkt een "piep" en het groene lampje gaat branden. Als de handbediening gedurende 90 seconden niet is gebruikt, schakelt het VENDLET-systeem weer uit.
3. Omdraaien van de cliënt vindt plaats met behulp van de functionaliteit op de handbediening.

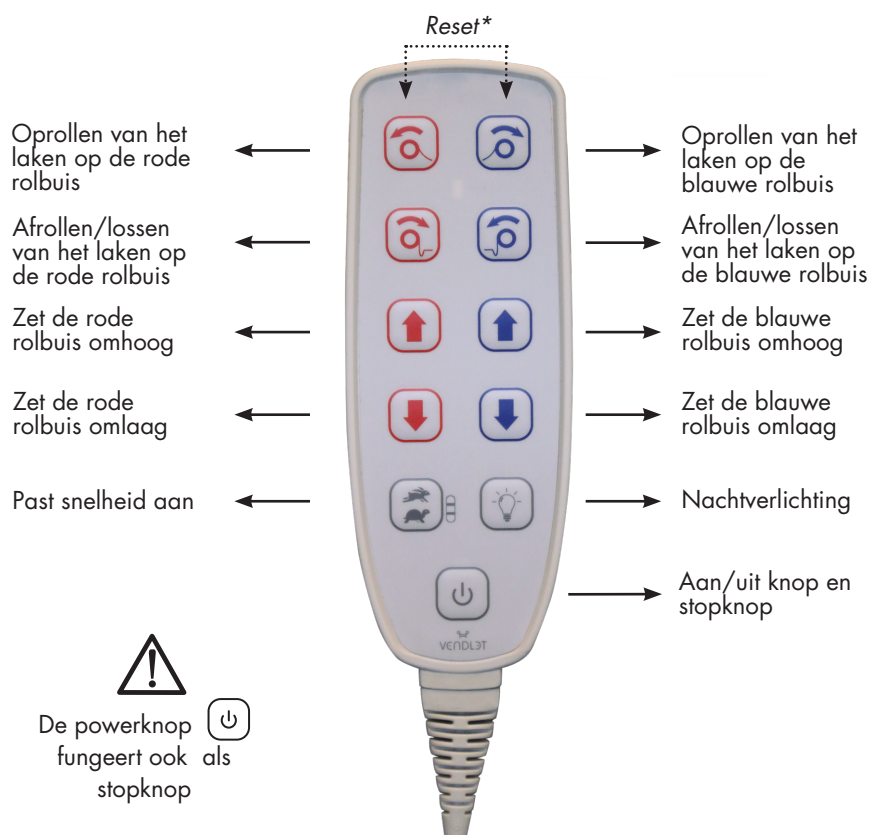

4. Als wordt ingeschat dat de cliënt gebruik dient te maken van zijhekkken, zet dan de rolbuizen omhoog. Rol het laken los.
5. Als wordt ingeschat dat de cliënt GEEN gebruik hoeft te maken van zijhekkken, zet dan de rolbuizen omlaag. Rol het laken los.

Houd altijd de focus op de cliënt bij het gebruik van de VENDLET Standard. 

** Als de handbediening knippert, reset u het systeem door op de bovenste twee knoppen van de handbediening te drukken. Er klinkt nu 10 ritmische piepgeluiden. Houd de knoppen ingedrukt totdat de piepgeluiden stoppen.*



VENDLET Standard

SNELSTARTGIDS



GLIJLAKEN AANBRENGEN

1. Doe de elastieken in de hoeken van het glijlaken om het matras.
2. Controleer of het oppervlak glad en egaal is, zonder kreukels of vouwen. De gladde kant moet naar boven zitten.
3. Bevestig de stukken klittenband aan de rand van het beweegbare ligvlak waarop het matras ligt. Het is belangrijk dat de bandjes rond het beweegbare ligvlak onder het matras worden aangebracht en niet rond het vaste bedframe. Anders kunnen het rug-, dij- en voetengedeelte van het bed niet worden gebruikt zonder dat het klittenband afscheurt.



WENTELLAKEN MET QUICK TAG AANBRENGEN

1. Leg het wentellaken midden op het bed.
2. Druk de rand van het wentellaken in de gleuf van de ene rolbuis. Start aan het hoofdeinde en ga naar beneden naar het voetendeinde.
3. Het wentellaken moet altijd OVER de rolbuizen gerold worden om te voorkomen dat vingers, haar en dergelijke van de cliënt beklemd raken onder het laken. Als het laken onder de rolbuis door ligt, vermindert de trekkracht en slaan de aandrijfmotoren van de rolbuizen af zodra het wentellaken strakgetrokken wordt rond de rolbuis.
4. Rol ca. $\frac{3}{4}$ -gedeelte van het laken rond de rolbuis door op  of  van de handbediening te drukken.
5. Druk de rand van het wentellaken in de gleuf van de tegenoverliggende rolbuis.
6. Rol het wentellaken om die rolbuis door op  of  te drukken, totdat het laken glad over het matras ligt met de rode streep midden op het matras.



DE VENDLET dient te worden gemonteerd en gebruikt zoals beschreven in de handleiding.

Scan de QR-code om instructiefilmpjes te zien



Alle rechten voorbehouden.
Copyright 2021 Vendlet ApS



Vers. 1.0 - september 2021