


VENDLET V5S Speed Adjust VENDLET Bari

SNELSTARTGIDS

HET GEBRUIK

1. Stel het bed op de juiste werkhoogte in.
2. Dubbelklik op  om de het VENDLET-systeem te activeren. Een akoestisch signaal klinkt en het groene lampje boven het power-symbool gaat branden. Als de handbediening gedurende 90 seconden niet is gebruikt, schakelt het VENDLET-systeem weer uit.
3. Omdraaien van een cliënt vindt plaats met behulp van de functionaliteit op de handbediening.

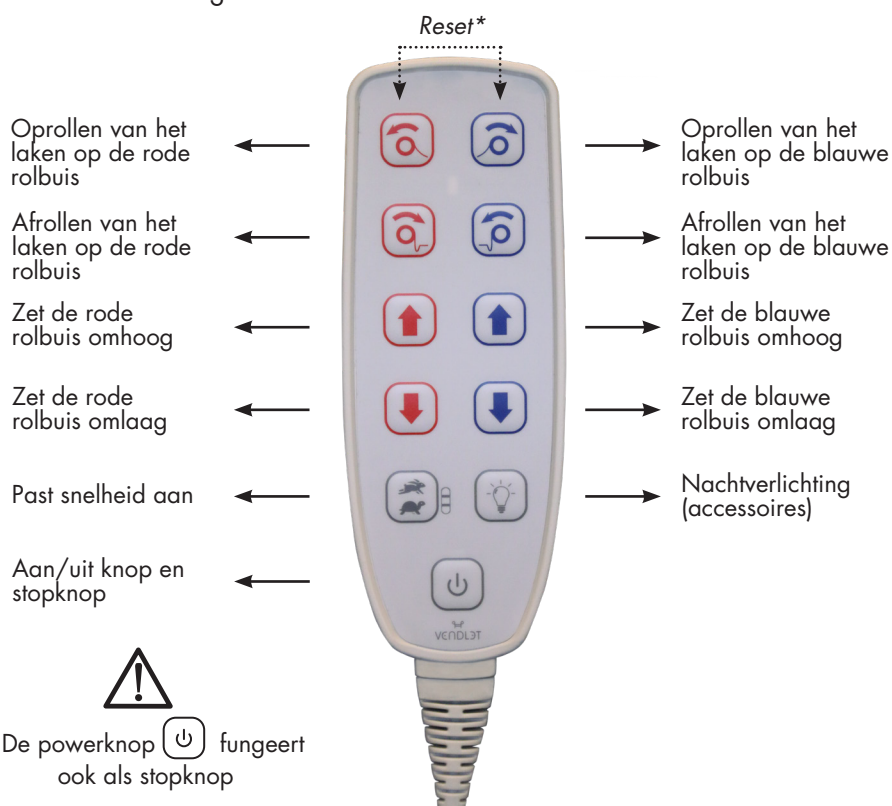

4. Indien beoordeeld dat de cliënt gebruik dient te maken van de zijhekken, zet deze dan omhoog. Laat het laken los.
5. Indien beoordeeld dat de cliënt geen gebruik hoeft te maken van de zijhekken, zet deze dan naar beneden. Laat het laken los.

Let op de patiënt tijdens het keren.



* Reset het systeem door de 2 bovenste knoppen op de handbediening tegelijkertijd in te drukken. Er klinkt nu 10 ritmische piepgeluiden. Houd de knoppen ingedrukt tot de piepgeluiden stoppen.

VENDLET dient te worden gemonteerd zoals beschreven in de handleiding.

Scan de QR-code om instructiefilmpjes te zien



VENDLET V5S Speed Adjust VENDLET Bari

SNELSTARTGIDS



GLIJLAKEN AANBRENGEN

1. Doe de elastieken in de hoeken van het glijlaken om het matras.
2. Controleer of het oppervlak glad en egaal is, zonder kreukels of vouwen. De gladde kant moet naar boven zitten.
3. Verbind de stukken klittenband rond het stalen frame onder het matras. Het is belangrijk dat het klittenband aan elkaar bevestigd kan worden rond het frame onder het matras en niet rond het bedframe, omdat anders het rug-, dij- en voetengedeelte van het bed niet omhoog bewogen kunnen worden.



WENTELLAKEN AANBRENGEN

1. Leg het wentellaken midden op het bed met het klittenband naar beneden.
2. Zet het wentellaken met het klittenband vast op de ene rolbuis. Begin bij het hoofdeind en ga verder richting het voeteneind.
3. Het wentellaken moet altijd OVER de rolbuizen gewikkeld zijn om te voorkomen dat vingers, haar en dergelijke van de bedlegerige persoon beklemd raken onder het laken.



Als het laken onder de rolbuis door ligt, vermindert de trekkracht en slaan de motoren van de rolbuizen af zodra het wentellaken strakgetrokken wordt rond de rolbuis.

4. Rol ca. $\frac{3}{4}$ -gedeelte van het laken rond de rolbuis door op  of  van de handbediening te drukken.
5. Druk het wentellaken vast op het klittenband op de tegenovergestelde rolbuis.
6. Rol het wentellaken om die rolbuis door op  of  te drukken, totdat het laken glad over het matras ligt met de rode streep midden op de matras.



*VENDLET dient te worden
gemonteerd zoals beschreven
in de handleiding.*

Scan de QR-code om
instructiefilmpjes te
zien

