

Zijframe beugel


Sommige zijframes hebben las- en/of afgeronde hoeken op het zijframe, waardoor de traditionele montage van de VENDLET gecompliceerd is. Bij gebruik van de zijframe beugel is er voldoende ruimte voor het monteren van de VENDLET.



Wees extra voorzichtig bij het monteren van de Zijframe beugel omdat het de afstand tussen VENDLET en de matras met nog eens 4 cm vergroot in vergelijking met de normale installatie van een VENDLET-systeem. Vooral de afstanden tussen de matras en VENDLET, en de hoofdeinden van het bed en VENDLET zijn belangrijk.

De set bevat:

- 2 stuks zijframe beugel
- 6 sets bevestigingsbeugels voor het frame
- 6 stuks M10x60 bouten voor het frame

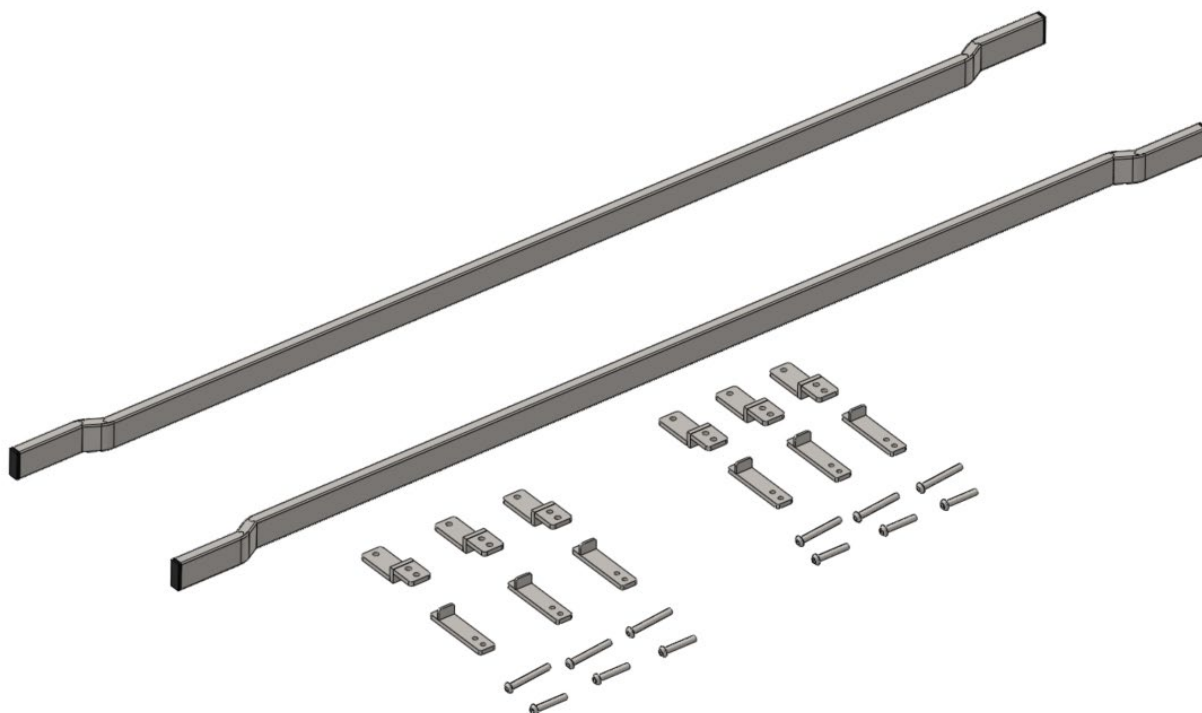

Item no.: 7000052

Vendlet B.V.
Einsteinweg 11H-J
3225LT Hellevoetsluis
Nederland
Tel. +31 (0)85-1300710
vendlet@vendlet.nl


Vendlet ApS
Egelund 33
6200 Aabenraa
Denmark
+45 9631 0050
vendlet@vendlet.dk

Montage-instructies

De zijframe beugel is gemonteerd zoals hieronder weergegeven. Het rode kader symboliseert het Zijframe waar de beugel is bevestigd.

Elke beugel is uitgerust met 3 stuks bevestigingsbeugels.

De afstand x mag niet groter zijn dan 40 cm.

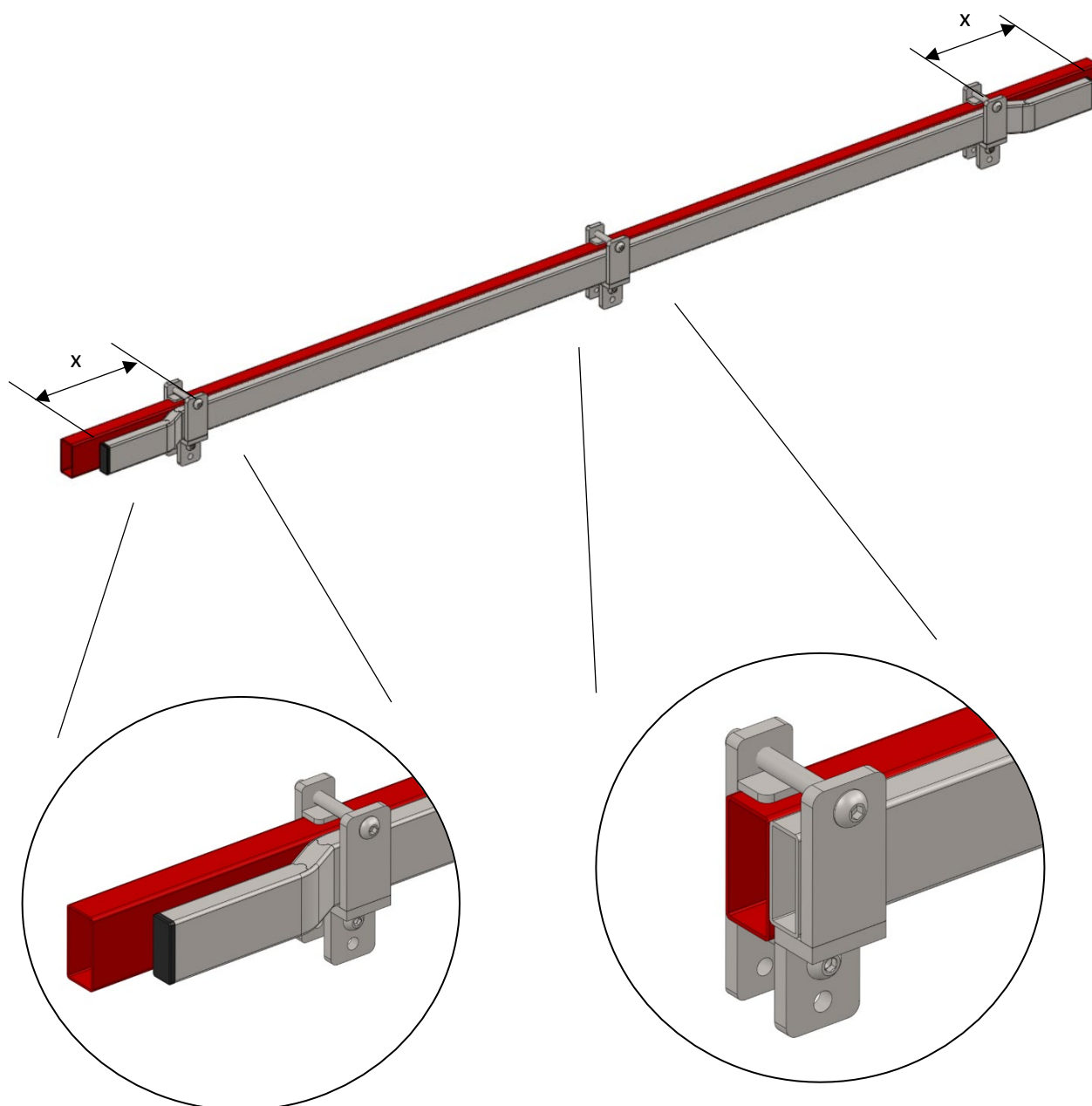

Vendlet B.V.
Einsteinweg 11H-J
3225LT Hellevoetsluis
Nederland
Tel. +31 (0)85-1300710
vendlet@vendlet.nl

Vendlet ApS
Egelund 33
6200 Aabenraa
Denmark
+45 9631 0050
vendlet@vendlet.dk