

Zijframe adapter

Bij sommige bedden is het bedframe verborgen onder het ondersteuningsvlak van het matras, waardoor traditionele montage van de VENDLET onmogelijk is.

Deze beugel maakt het mogelijk om de VENDLET te installeren op bedden met bedframes, die verborgen zijn onder het ondersteuningsvlak van het matras.



Deze beugel is alleen geschikt voor VENDLET-systemen tot 250 kg


Waarschuwing: de SWL voor het bed wordt verminderd door het gewicht van de zijframe adapter

Houd u nog steeds aan de afstandsvereisten

De zijframe adapter weegt in totaal 16,4 kg en heeft 5 verschillende posities in stappen van 3 cm per keer. Het biedt montageposities in het bereik van 6 cm tot 18 cm ten opzichte van het bedframe.

De set bevat:

- 2 stuks vierkante buis van 50x20 mm
- 4 sets complete montagebeugels voor het frame
- 8 stuks M10x40 bouten voor de beugel
- 8 stuks M8x45 bouten voor de beugel
- 4 stuks M8x35 bouten voor montage van de 50x20 mm vierkante buis

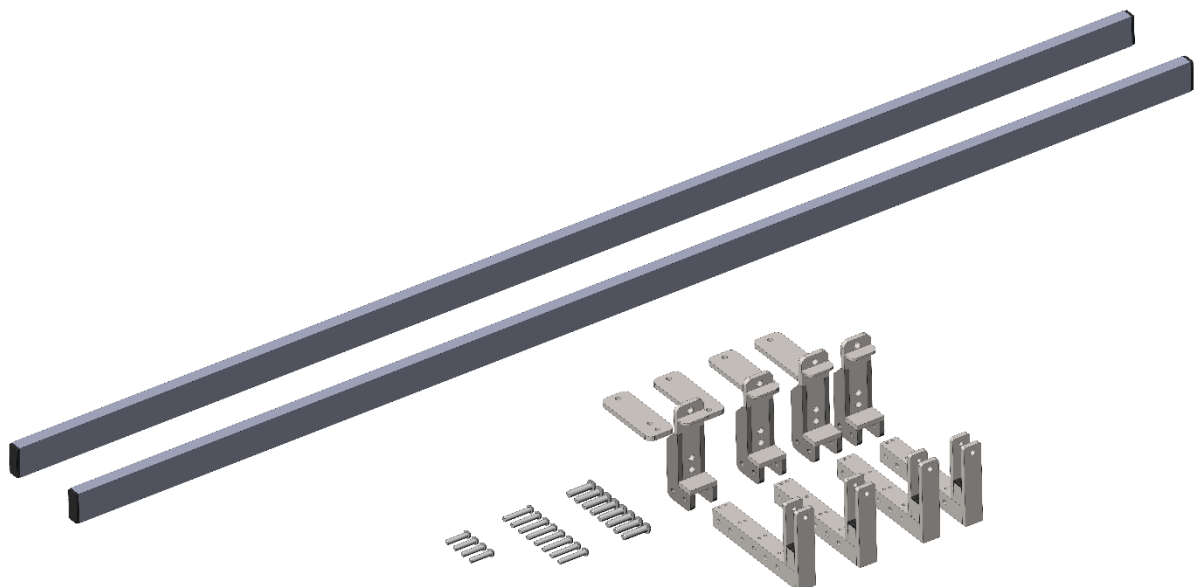

Montage-instructies

De zijframe adapter wordt gemonteerd zoals hieronder weergegeven. Het rode frame symboliseert het bedframe waar de beugel aan bevestigd is.

