



LEJRELET

Eenvoudig en efficiënt positioneren

Van stabiliteit naar vitaliteit



Het belang van positioneren

Positioneren in bed is van doorslaggevend belang voor het comfort en welzijn van de cliënt. Positioneren is ook een belangrijk onderdeel van preventieve maatregelen en herstel.

Er zijn veel situaties waarin positioneren veel aandacht verdient. Dit geldt met name voor:

- Permanent of langdurig bedlegerige cliënten
- Cliënten met verminderde mobiliteit
- Cliënten met decubitus of risico op decubitus
- Cliënten die hygiënische verzorgd worden in bed
- Onrustige en onstabiele cliënten

Wanneer positioneren geïntegreerd is in de zorg voor dergelijke cliënten, zal dit een positieve invloed hebben op hun herstel en hun algemene levenskwaliteit.

Positioneren zal ook een positieve invloed hebben op de gezondheid en veiligheid van de zorgverlener, aangezien de processen rond de cliënt vaak makkelijker zijn om te beheersen en te behandelen.



Goed positioneren is stabiel positioneren

Een goed uitgevoerde positionering is een stabiele positionering. Stabiliteit faciliteert het gevoel van veiligheid en ontspanning voor de cliënt. Bovendien zorgt goed positioneren voor een betere ondersteuning van het lichaam of specifieke lichaamsdelen. Dit zorgt voor een betere drukverdeling die lokale druk en pijn kan verlichten. Goed positioneren voorkomt bijvoorbeeld ook neuropathieën en verstopping van bloedvaten. Goed positioneren wordt ook bewerkstelligd door de gewrichten van de cliënt in een neutrale positie te plaatsen; dat is de positie waarin de gewrichtskapsels en -banden het minst gespannen zijn. Dit vereist gepaste en geschikte positioneringskussens.

“Goed positioneren is absoluut essentieel voor de het welzijn van de cliënt, de ziekteprogressie en het comfort.”

De filosofie achter LEJRELET

Volgens fysiotherapeut Peter Maindal die de LEJRELET-serie heeft ontwikkeld, is het essentieel om effectief positioneren te waarborgen. En dit wordt gedaan door ervoor te zorgen dat de positioneringskussens eenvoudig te gebruiken zijn.

De serie bestaat uit slechts zes kussens die het voor de zorgverleners duidelijk en eenvoudig maken. De grootte en vorm van de kussens biedt een grote flexibiliteit, waardoor een enkel kussen voor meerdere doeleinden kan worden gebruikt, zowel individueel als in combinatie met elkaar.



“Bij permanent bedlegerige patiënten moet de focus liggen op goede positionering, in lijn met de aandacht voor voeding, wonden en incontinentie.”





LEJRELET Tube 250

LEJRELET Tube 250 is een lang zacht cilindervormig kussen, dat in tegenstelling tot vele andere cilinderkussens gevuld is met visco-elastische schuimkorrels. Dit maakt Tube 250 stabiel, makkelijk te vormen en blijft de vulling daar waar je wilt. Bovendien geeft de vulling Tube 250 een goed gewicht, wat goede tactiele prikkels biedt. Daardoor heeft Tube 250 een kalmerend effect op veel gebruikers.

Tube 250 is langer dan andere cilindervormige kussens, waardoor het mogelijk is om de hele lichaam te positioneren, zelfs voor grotere gebruikers.

Doordat de bedlegerige persoon zo kan worden gepositioneerd dat dit hem of haar kalmeert, wordt ook de werkomgeving voor de zorgverleners verbeterd.

Voorbeelden voor gebruik van LEJRELET Tube 250:

- Ondersteuning van het gehele lichaam in laterale positie
- Positioneren in een 30 graden hoek
- Drukverlaging voor armen en schouderbladen
- Ondersteuning van de benen en drukverlaging van de hielen
- Comfortabele en rustgevende houding



Artikel nr. 5000001

Gewicht 4700 g

Afmeting Ø 25 x L 250


Materialen

Vulling 100% Visco-elastisch schuim


Wassen en reinigen




LEJRELET Tube 250 kan worden afgenomen met milde zeep, ontsmettingsmiddel of overgoten worden met kokend water.

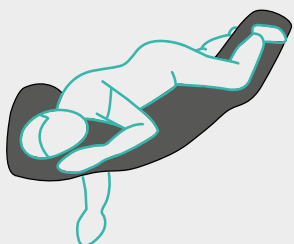


Ondersteuning van het gehele lichaam in laterale positie.

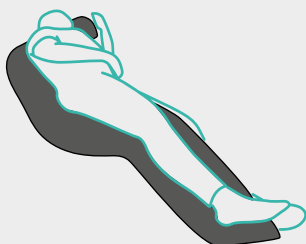

Positioneren in een 30 graden hoek.

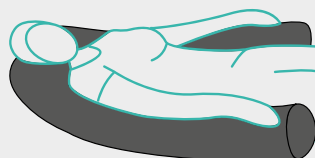

Drukverlaging voor armen en schouderbladen.

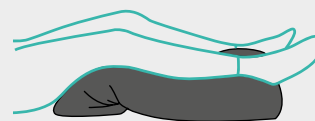

Ondersteuning van de benen en drukverlaging van de hielen.



LEJRELET Tube 125

LEJRELET Tube 125 heeft dezelfde eigenschappen als de LEJRELET Tube 250. De Tube 125 is erg plooibaar en is daardoor erg gebruiksvriendelijk in veel situaties.

Het is echter slechts de helft van de lengte, 125 cm, en weegt daarom ook minder.

LEJRELET Tube 125 werkt goed bij kortere mensen en grote kinderen. Het werkt ook goed voor cliënten met een amputatie van de onderste extremiteiten en die ondersteuning nodig hebben voor de amputatie.

Bovendien kan deze LEJRELET Tube 125 eenvoudig gevormd worden om goede ondersteuning te bieden voor personen met ernstige contracties.

Voorbeelden voor gebruik van LEJRELET Tube 125:

- Ondersteuning van het lichaam in de laterale positie
- Voor 30-graden positionering voor beenamputaties
- Ondersteuning van benen en onderarmen in een zittende positie
- Stabiliseren van zijligging in gebogen houding



Artikel nr. 5000000

Gewicht 2350 g

Afmeting Ø 25 x L 125


Materialen

Vulling 100% Visco-elastisch schuim


Wassen en reinigen




LEJRELET Tube 125 kan worden afgenomen met milde zeep, ontsmettingsmiddel of overgoten worden met kokend water.

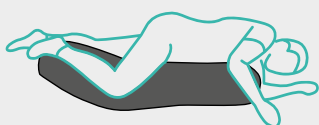

Ondersteuning van het lichaam in de laterale positie

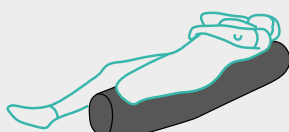

30 graden positionering bij beenamputaties

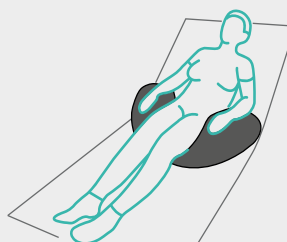

Ondersteuning van benen en onderarmen in een zittende positie



Stabiliseren van zijligging in gebogen houding - hier met Pad Low



LEJRELET Wedge


LEJRELET Wedge is een driehoekig kussen dat in veel verschillende situaties gebruikt wordt voor stabilisatie, verlichting en positionering.

Wedge is gebaseerd op een anatomische weergave van de thorax en het bekken. Als Wedge bijvoorbeeld wordt gebruikt voor stabilisatie aan de voorzijde van het lichaam, zorgt de hoogte van Wedge voor maximale ondersteuning van de arm en torso.

Positionering in zijdelingse positie met Wedge, voor het lichaam of achter de rug, geeft de gebruiker goede stabiliteit. Dit vergemakkelijkt de werksituatie voor de verzorger, bijvoorbeeld bij het verzorgen van wonden of andere behandelingen.

Voorbeelden voor gebruik van LEJRELET Wedge:

- Stabilisatie achter de rug in laterale positie
- Stabilisatie aan de voorkant van het lichaam in laterale positie
- Ondersteuning van de arm in de laterale positie
- Ondersteuning van het been in de laterale positie
- Ondersteuning van de benen in de liggende positie

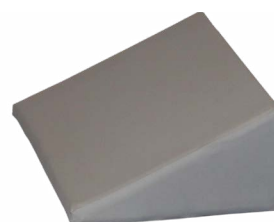

Artikel nr. 5000002

Gewicht 550 g

Afmeting H 15 x B 30 x L 50


Materialen

Vulling Polyurethaan schuim en visco-elastisch schuim


Wassen en reinigen




LEJRELET Wedge kan worden afgenomen met milde zeep, ontsmettingsmiddel of overgoten worden met kokend water.

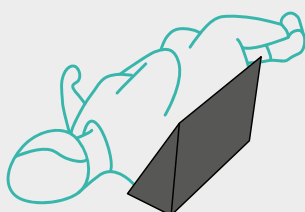


Stabilisatie achter de rug in laterale positie

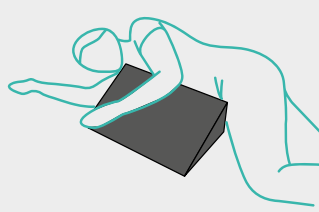

Stabilisatie aan de voorkant van het lichaam in laterale positie

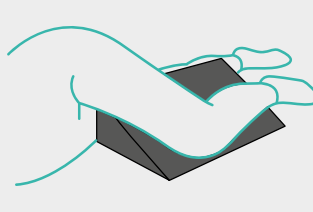

Ondersteuning van het been in de laterale positie

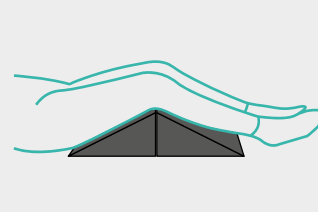

Ondersteuning van de benen in de liggende positie



LEJRELET Pad High

LEJRELET Pad High is een rechthoekig kussen dat wordt gebruikt voor stabilisatie, verlichting en positionering.

Pad High is gebaseerd op een anatomische weergave van de thorax en het bekken. Als Pad High bijvoorbeeld wordt gebruikt om het been in de laterale positie te ondersteunen, zorgt u ervoor dat de heupflexie neutraal wordt gehouden. Dat wil zeggen: u voorkomt lumbale rotatie, compressie in het heupgewricht en het uitrekken van het gewrichtskapsel.

Ondersteuning van het been in een zijdelingse positie met Pad High zorgt voor een betere werksituatie voor de zorgverleners bij hygiëneverzorging van de zorgvrager.

Voorbeelden voor gebruik van LEJRELET Pad High:

- Ondersteuning van het been in de laterale positie
- Ondersteuning van been tijdens lagere hygiëne
- Ondersteuning van de arm in de laterale positie
- Ondersteuning van benen en drukverlichting van de hielen



Artikel nr. 5000003

Gewicht 800 g

Afmeting H 15 x B 30 x L 50


Materialen

Vulling Polyurethaan schuim en visco-elastisch schuim


Wassen en reinigen




LEJRELET Pad High kan worden afgenomen met milde zeep, ontsmettingsmiddel of overgoten worden met kokend water.

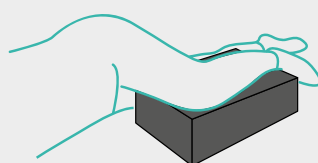


Ondersteuning van het been in de laterale positie

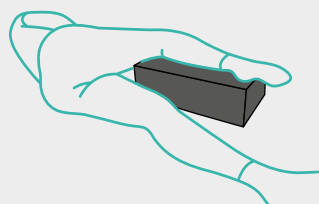

Ondersteuning van been tijdens lagere hygiëne

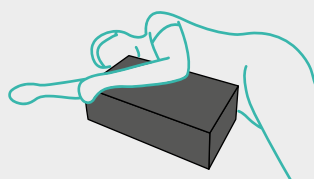

Ondersteuning van de arm in de laterale positie

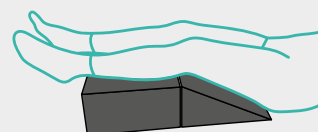

Ondersteuning van benen en drukverlichting van de hielen



LEJRELET Pad Low

LEJRELET Pad Low is gemaakt van visco-elastisch schuim en daardoor eenvoudig te vormen en aan te passen aan de gebruiker. Dit zorgt voor optimale drukverlichting en aanpassing in situaties waar extra stabiliteit en ondersteuning nodig zijn.

Pad Low kan in verschillende situaties gebruikt worden voor positionering en drukverlichting. Pad Low kan ook worden benut om de gebruiker te beschermen tegen harde oppervlakken of scherpe randen, bij bijvoorbeeld transfers. Pad Low kan zowel plat, opgerold, gebogen of gevouwen gebruikt worden.

Voorbeelden voor gebruik van LEJRELET Pad Low:

- Ondersteuning van arm/hand
- Ondersteuning van onderbeen of hiel(en)
- Drukverlaging voor hielen
- Drukverlaging tussen de knieën in laterale positie
- Opgerold als abductie wig



Artikel nr. 5000004

Gewicht 350 g

Afmeting H 4 x B 30 x L 50


Materialen

Vulling 100% Visco-elastisch schuim


Wassen en reinigen




LEJRELET Pad Low kan worden afgenomen met milde zeep, ontsmettingsmiddel of overgoten worden met kokend water.

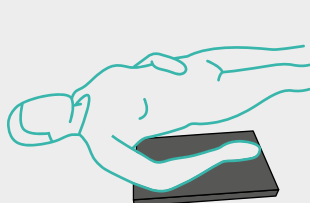


Ondersteuning van arm/hand

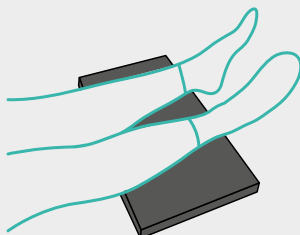

Drukverlaging voor hielen

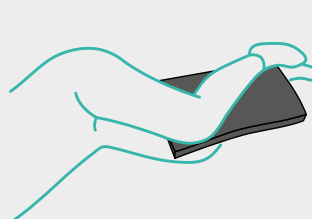

Drukverlaging tussen de knieën in laterale positie

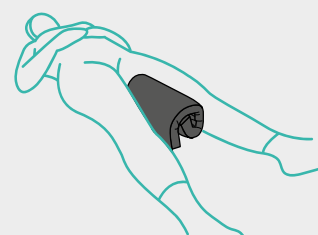

Opgerold als abductie wig



LEJRELET Oval

LEJRELET Oval is een klein ovaal kussen gemaakt van visco-elastische schuimkorrels. Met LEJRELET Oval is het mogelijk om microbewegingen te creëren bij het positioneren van een bedlegerig persoon.

Wanneer we positioneren met microbewegingen, creëren we frequente en discrete herpositionering, waardoor een rustige nacht voor de gebruiker wordt gewaarborgd. Dit ondersteunt een ononderbroken slaap, wat erg belangrijk is voor de stofwisseling van de gebruiker.

LEJRELET Oval is gemaakt van een zeer flexibel materiaal en biedt uitstekende plooibaarheid. Daarom is het eenvoudig te gebruiken en ervaart de gebruiker goede ondersteuning en comfort.

Voorbeelden voor gebruik van LEJRELET Oval:

- Tussen de knieën of voeten
- Als lendensteun
- Ondersteuning van schouder of elleboog
- Ondersteuning van verlamde arm of hand
- Tussen arm en thorax



Artikel nr. 5000009

Gewicht 350 g

Afmeting H 10 x B 25 x L 40


Materialen

Vulling 100% Visco-elastisch schuim

Wassen en reinigen



LEJRELET Oval kan worden afgenomen met milde zeep, ontsmettingsmiddel of overgoten worden met kokend water.

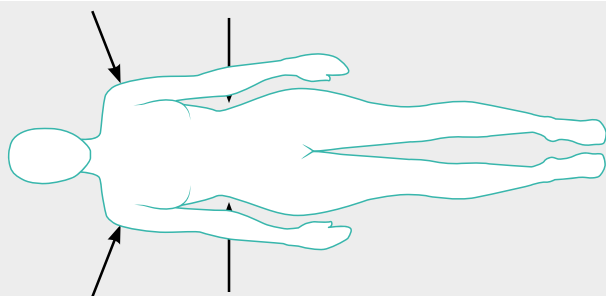

Plaatsing van het kussen na het herpositioneren



Plaatsing onder de schouder



Plaatsing onder de heup



LEJRELET Combinaties

De LEJRELET kussens kunnen zowel individueel als in combinatie met elkaar worden gebruikt. Dit biedt grote flexibiliteit en de mogelijkheid om uw creativiteit en professionaliteit te gebruiken om de beste ondersteuning voor uw cliënt te vinden.

Het combineren van Wedge en Pad High is zeer handig in veel situaties. Hieronder tonen we enkele van de meest voorkomende combinaties van de 2 kussens.


U kunt ook de video bekijken die de combinaties van de 2 kussens laat zien.




Bekijk de video op onze website of door deze QR code te scannen.



Voorbeelden van combinaties van Wedge en Pad High

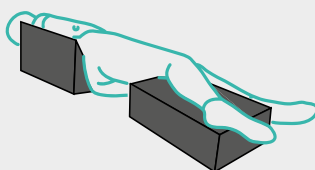


Stabilisatie 70 graden positie met goede steun van onderbeen.

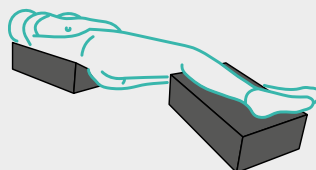

Stabilisatie 30 graden positie met goede steun van het onderbeen.



Stabilisatie laterale positie om te voorkomen dat de gebruiker op de buik draait

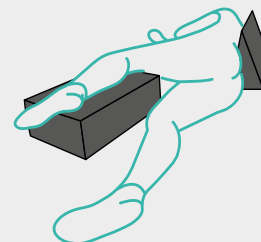

Stabilisatie laterale positie om te voorkomen dat de gebruiker op de rug draait. Ideaal voor hygiënische verzorging in bed.

LEJRELET sets



Set met Tube 250

Set bestaande uit Tube 250, Wedge, Pad High, Pad Low en Oval. Deze set wordt geleverd in een praktische tas voor opslag.

Artikel nr. 5000011



Set met Wedge, Pad High en Pad Low

Set zonder tubes en tas.

Artikel nr. 5000005

Stof

De stof van LEJRELET is zorgvuldig gekozen om comfortabel voor de huid te zijn en te voorkomen dat het wegglijdt over het laken.

De stof is in twee richtingen rekbaar, waardoor het visco-elastisch schuim optimaal kan werken.

Daarnaast heeft de stof de volgende kenmerken:

- Waterbestendig
- Waterdamp doorlatend
- Antibacterieel behandeld
- Huisstofmijt dicht
- Bio compatibel
- Öko-TEX, klasse 1
- Brandvertragend tot Crib 5



Set met Tube 125

Set bestaande uit Tube 125, Wedge, Pad High, Pad Low en Oval. Deze set wordt geleverd in een praktische tas voor opslag.

Artikel nr. 5000010



Tas

Praktische tas voor het opbergen van LEJRELET kussens.

Artikel nr. 5000007

Vulling

Zowel LEJRELET Tube, Oval als Pad Low zijn gevuld met 100% visco-elastisch schuim. Het drukverlagende schuim zorgt voor een groot draagvlak, goede drukvermindering en hoog comfort voor de gebruiker.

LEJRELET Wedge en Pad High zijn gemaakt met een kern van polyurethaanschuim bedekt met 2 cm visco-elastisch schuim.

Deze combinatie maakt de kussens stevig en ondersteunend, maar ze zijn nog steeds flexibel en zorgen voor effectieve drukvermindering en comfort.

Visco-elastische schuim en polyurethaanschuim zijn brandvertragend.

GEDISTRIBUEERD DOOR:



A DIRECT HEALTHCARE GROUP COMPANY

United Care BV

Bremenweg 5
9723 TC Groningen, Nederland
Tel: +31 (0) 50 - 30 50 900
www.unitedcare.nl
info@unitedcare.nl



GEFABRICEERD DOOR:



Moving Health Forward

Direct Healthcare Group Ltd

Withey Court, Western Industrial Estate
Caerphilly, UK, CF83 1BF
Tel: +44 (0) 800 043 0881
Fax: +44 (0) 845 459 9832
info@directhealthcaregroup.com

GEMACHTIGDE VERTEGENWOORDIGER,
IMPORTEUR EN DISTRIBUTEUR IN DE EU:



Moving Health Forward

Direct Healthcare Group Sverige AB

Torshamnsgatan 35
SE-164 40, Kista, Sweden
Tel: +46 (0) 8 557 200
www.dhg-healthcare.com
info@directhealthcaregroup.com